


Atmosphère Onrusthekken

00433 Het Atmosphère onrusthekken bestaat uit één geheel en is neerklapbaar door een eenvoudig te bedienen vergrendelsysteem.

Opbouw


- Het Atmosphère onrusthekken bestaat uit een kantelbaar geheel dat d.m.v. twee stevige assen op het bed gemonteerd wordt.
- Het kantelbaar geheel bestaat uit twee delen die scharnierend verbonden zijn door drie vaste buizen.
- Alle buizen zijn dikwandig uitgevoerd, teneinde extreme belasting aan te kunnen.
- Onderaan bevindt zich een glijstelsysteem dat vergrendeld wordt d.m.v. een veiligheidspal.
- Het onrusthekken kan naar beneden gebracht worden door met één hand de veiligheidspal te ontgrendelen en met de andere hand het onrusthekken naar het voeteneinde te bewegen.
- De hekkens bieden over $\pm 3/4$ van de totale bedlengte bescherming, met de opening aan het voeteneinde.
- De onrusthekkens vallen volledig binnen de stootwielbreedte van het bed en komen in de laagste positie niet boven de matras.
- In de laagste stand vormt het onrusthekken geen obstakel bij het uitstappen, bij een transfer van de patiënt of bij het opmaken van het bed.
- De totale hoogte bedraagt ca 36 cm gemeten vanaf het ligvlak, met een optionele 4de buis bedraagt dit 44,5 cm.

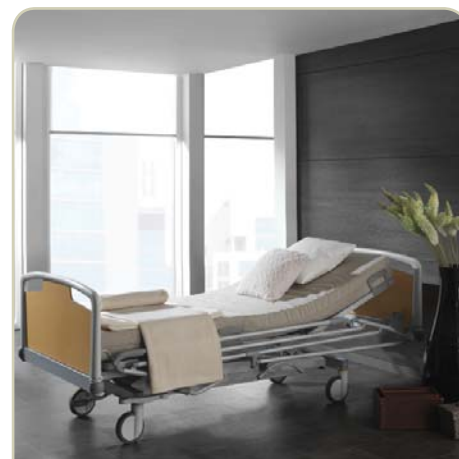

Afmetingen


00433 | Atmosphère 3- buizen

- L x H: 151 cm x h 36 cm
- max. matrashoogte: 14 cm

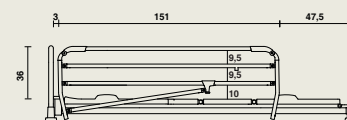

00433 | Atmosphère 4- buizen

- L x H: 151 cm x h 44,5 cm
- max. matrashoogte: 22 cm

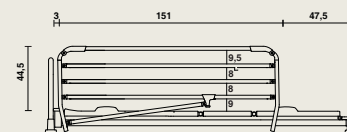

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 of in chroom.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

De Atmosphère onrusthekken voldoen aan de **norm EN 60601-2-52**.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Atmosphère 4- buizen.
- Uitvoering in chroom.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

