


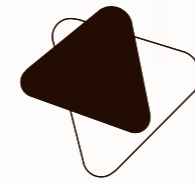


WEL Communications



Siena & Aris Care

by Haelvoet

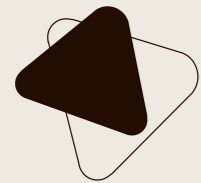

HAEVOET NV **BELGIUM**
L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER
T +32 (0) 51 48 66 95 F +32 (0) 51 48 73 19
INFO@HAEVOET.BE WWW.HAEVOET.BE

ZIEKENHUISMEUBILAIR - MEUBILAIR VOOR WOON- EN ZORGCENTRA

Siena

Het Siena verpleegbed is een gebruiksvriendelijk bed met een uiterst functioneel en doeltreffend ligvlak.




001	Onrusthekkens (*) • Veiligheid kent geen prijs
	De Atmosphère onrusthekkens beschermen de patiënt over 2/3 van de lengte van het bed. Indien een bescherming over de volledige lengte gewenst is, kan men kiezen voor de Pollux of Trix onrusthekkens.
002	Ligvlak • Comfortabel liggen
	Naar keuze worden er 2 verschillende ligvlaktypes aangeboden. Standaard is het ligvlak uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen. De optionele volkunststof ligvlakdelen (*) zijn uitneembaar en gemakkelijk in onderhoud.
003	Bedpanelen • Een harmonieus geheel
	Keuze uit 4 verschillende bedpanelen, Midea, Puro (*), Felina (*) en Valentino (*), in fraaie houtdecors.
004	Matrashouders • Doelgericht aanwezig
	De matrashouders verhinderen een zijdelingse verschuiving van de matras. Deze dienen eveneens als handvat om de rug- en kniesteun manueel te verstellen.
005	Hulzen • Optimale verzorging
	Twee hulzen aan het hoofdeinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal en naar wens uitgerust kan worden.
006	Bedieningshendel • Centraal en binnen handbereik
	De bedieningshendel activeert een gasveer teneinde het gewenste ligvlakdeel te kunnen verstellen. Optioneel kunnen de rug- en knieverstelling elektrisch geactiveerd worden. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om de elektrische functies met één knop uit te schakelen d.m.v. een vergrendeldoos (*).
007	Accessoirehouders (*) • Hoge functionaliteit
	Aan beide zijden zorgen 3 multifunctionele houders voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van accessoires.
008	Houten ombouw ligkader (*) • Extra uitstraling
	De houten afwerkingslat aan het ligkader draagt bij tot de huiselijke uitstraling van het bed.
009	Bedverlenging • Verhoogde flexibiliteit
	De geïntegreerde bedverlenging laat standaard toe om het bed met 20 cm te verlengen. Een optionele voetensteunverlenging (*) garandeert een volledige functionaliteit van het ligvlak.
010	Wielen (*) • Grote wendbaarheid
	Een ruime waaier aan hoogwaardige designwielen garandeert een uiterst mobiel en wendbaar bed.

Comfort voor ieder

De bewoner en verzorgend personeel eisen vandaag een comfortabel en ergonomisch bed, zodat de resident zich zo autonoom mogelijk kan voelen en de verpleging de nodige zorg efficiënt kan toedienen.


• Bedieningen

De bedieningshendel is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk bereikbaar aan beide zijden van het bed.

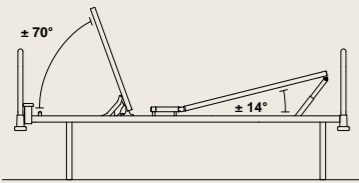


Zit- of relaxpositie

Het drie- of vierdelige (*) ligvlak biedt veelvoudige verstelmogelijkheden en beschikt over een zeer toegankelijke bediening aan beide zijden van het bed. Op deze manier kan gemakkelijk de gewenste zitpositie - of bij een vierdelig ligvlak een relaxpositie (*) - verkregen worden. De rug- en knieverstelling kan optioneel elektrisch worden geactiveerd d.m.v. een handbediening (*). Hierbij kan men ook opteren voor een vergrendeldoos die de elektrische functies met één knop uitschakelt (*).

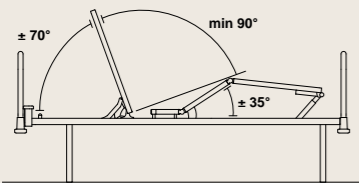


Trendelenburgpositie

De Trendelenburgpositie (*) kan uitgevoerd worden via het rode voetpedaal aan het voeteneinde van het bed. Wanneer het pedaal wordt ingedrukt, inclineert het bed in een zacht vloeiende beweging tot de gewenste positie.

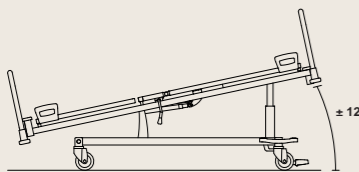

• Virtueel draaipunt

Een virtueel draaipunt verhoogt aanzienlijk het ligcomfort voor de resident. Bij het inclineren van de rugsteun verschuift deze rugsteun automatisch mee naar achteren. Hierdoor ontstaat er een drukontlasting van de bekkenzone en wordt het decubitusrisico gereduceerd.

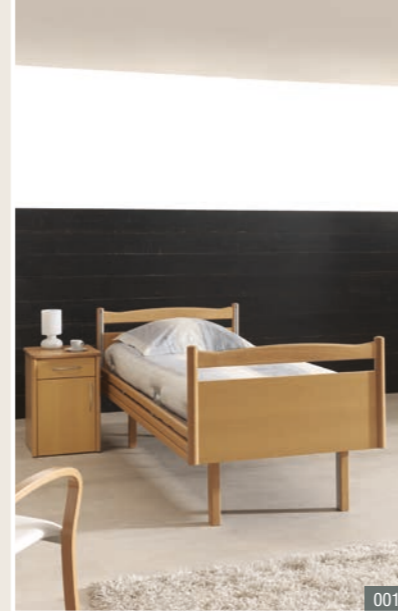

• Hoog/laag onderwagen

De hoog/laag onderwagen Vico (*) kan eenvoudig onder het bed worden geplaatst om zo een volwaardig hoog/laag bed te verkrijgen. In combinatie met de verwijderbare kunststof afdekkap (*) zijn de moeilijk bereikbare oppervlakken gemakkelijk te reinigen.

Gebruiksvriendelijk

Bij het ontwerp van het Siena bed werd ruime aandacht besteed aan efficiëntie in de verzorging.

• Wielen - Hogere mobiliteit


Het dagelijkse gebruik van het Siena bed wordt vereenvoudigd dankzij een gemakkelijk verplaatsbaar en wendbaar bed. Er is een ruime keuze aan wielen (Ø 100 mm of Ø 125 mm) al dan niet centraal geremd (*).



standaard op vaste poten of in hoogte verstelbare (*) poten



wielen Ø 100 mm individueel geremd en optioneel in de hoogte verstelbaar (*)

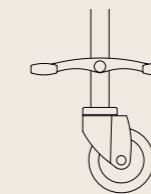

wielen Ø 125 mm centraal geremd met richtingswiel (*)
Dit richtingswiel vergemakkelijkt het besturen van het bed bij een rechtlijnig traject.




• Bedverlenging

Een verpleegbed moet aan ieders wensen kunnen voldoen, onafhankelijk van de grootte van de bewoner. De geïntegreerde bedverlenging laat toe om het bed met 20 cm te verlengen.

Twee mogelijkheden voor de ligvlakverlenging zijn naar keuze beschikbaar: een telescopische voetensteunverlenging (*) eventueel in combinatie met de verlengbare Trix onrusthekkens of een demonteerbare ligvlakverlenging van 20 cm.

Veiligheid troef

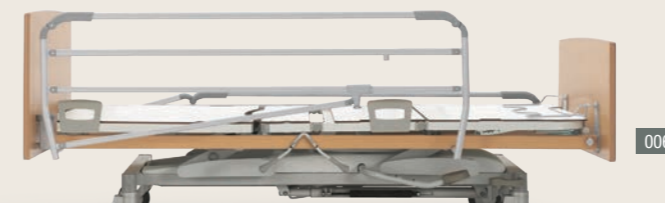

001 Het Siena Care bed in combinatie met de Atlas nachttafel.

002 De bedieningshendel.

003 Het Trendelenburgpedaal (*).

004 Het virtueel draaipunt van de rugsteun.

005 Het Trix onrusthekkens (*) beschermt de resident over de volledige bedlengte, dankzij de unieke telescopische verlenging.

006 Het Siena Care bed met volkunststof ligvlak (*), Atmosphère onrusthekkens (*) en een houten ombouw ligvlak (*).


007 Het Siena Care bed is uitgerust met stalen ligvlakprofielen, Pollux onrusthekkens (*) en een houten ombouw ligvlak (*).

008 Het Siena Care bed met stalen ligvlakprofielen, Trix onrusthekkens (*) en een houten ombouw ligvlak (*).

* optie bij Siena Care

Siena Care Samenvatting

Afmetingen en prestaties (bij standaard bed)

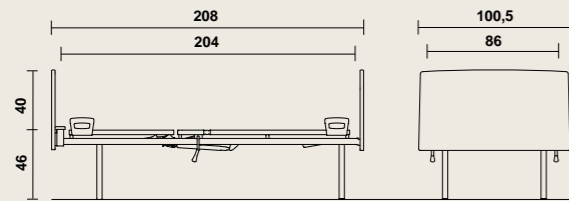

- lengte: 208 cm, breedte: 100,5 cm;
- hoogte ligvlak: ± 46 cm, optioneel verstelbaar tot ± 55 cm (in 3 standen);
- veilig werkgewicht: 180 kg;
- gewicht (excl. uitbreidingen): 65 kg;
- ligvlakmaat: 204 x 86 cm;
- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm (*).

* matrasdikte is afhankelijk van type onrusthekken



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten.



Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen, een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor een eerlijk product.



Het Siena verpleegbed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties.

EN 60601-1-2 Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen.

EN 60601-2-52 Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden.

EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.


	Standaard Siena		Opties Siena			
LIGVLAK						
	• 3-delig stalen ligvlak	• Telescopische bedverlenging tot 20 cm	• 4-delig stalen ligvlak	• 3-delig ligvlak met uitneembare volkunststof platen	• 4-delig ligvlak met uitneembare volkunststof platen	• Voetensteunverlenging tot 20 cm
WIELEN						
	• Poten vaste hoogte		• Verstelbare poten in 3 standen	• Niet-verstelbare poten, wielen ø 100 mm, individueel geremd	• Verstelbare poten, wielen ø 100 mm, individueel geremd	• Niet-verstelbare poten, wielen ø 125 mm, centraal geremd
PANEELTYPE						
	• Midea paneel		• Puro paneel	• Felina paneel	• Valentino paneel	• Stootwielen (niet op Mideapaneel) • Muurafstandhouder
ONRUSTHEKKENS						
			• Atmosphère onrusthekken	• Pollux onrusthekken	• Trix onrusthekken	• Trix onrusthekken met 4de lat
BEDIENING						
	• Bedieningshendel		• Elektrische handbediening	• Vergrendeldoos (ACL)	• Trendelenburg pedaal (vaste hoogte)	
EXTRA'S						
	• 2 bevestigingschulzen aan hoofdeinde		• Hoog/laag onderwagen Vico	• Houten ombouw ligvlak	• Houten pootombouw	• 6 kunststof accessoirehaakjes



Aris

Het Aris Care bed is een efficiënt en comfortabel zorgbed. De optionele inclineerbare rugsteun laat zich eenvoudig aan beide bedzijden bedienen.


001	Ligvlak • Comfortabel liggen
	Het ligvlak is standaard uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen.
002	Bedpanelen • Stijlvol en duurzaam
	De bedpanelen zorgen voor een stijlvol geheel. Keuzemogelijkheid uit hoge panelen, lage panelen of een combinatie.
003	Hulzen • Optimale verzorging (enkel voor 2-delig ligvlak)
	Twee hulzen aan het hoofdeinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal en naar wens uitgerust kan worden.
004	Bedieningshendel (*) • Centraal en binnen handbereik (enkel voor 2-delig ligvlak)
	De bedieningshendel activeert aan beide zijden een gasveer teneinde de rugsteun naar wens te kunnen instellen.
005	Houten ombouw ligkader (*) • Extra uitstraling
	De houten afwerkingslat aan het ligkader draagt bij tot de huiselijke uitstraling van het bed.

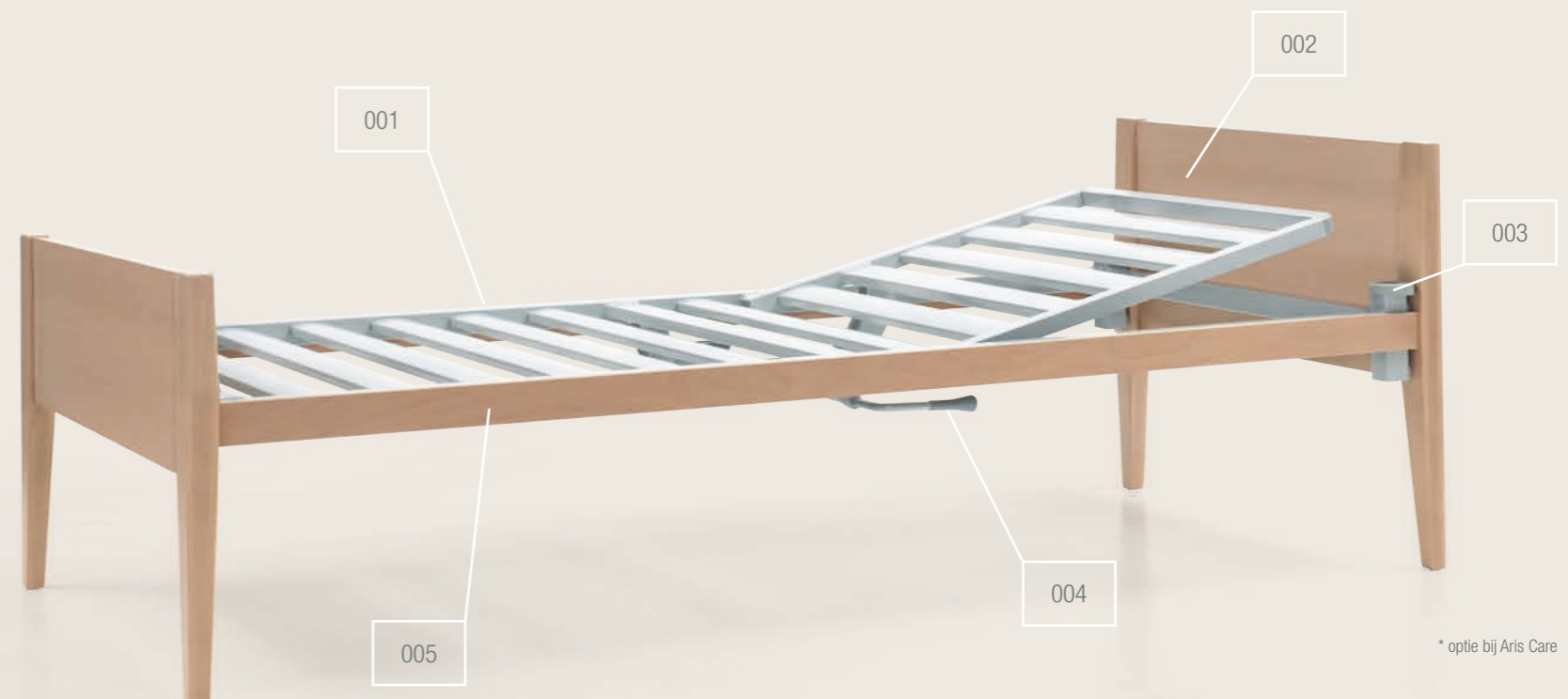

* optie bij Aris Care

Aris Care Samenvatting

Afmetingen

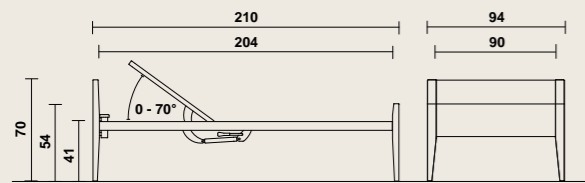

- lengte: 210 cm, breedte: 94 cm;
- hoogte ligvlak: ± 41 cm;
- ligvlakmaat: 204 x 90 cm;
- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm.



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten.



Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen, een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor een eerlijk product.



Het Aris verpleegbed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor veiligheid, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

EN 60601-2-52 Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

	Standaard Aris	Opties Aris
LIGVLAK	 • 1-delig stalen ligvlak	 • 2-delig stalen ligvlak
POTEN	 • Poten met vloerbeschermers	
PANEELTYPE	 • Bedpaneel Aris Care	 • Combinatie hoog hoofdpaneel/ laag voetpaneel
BEDIENING		 • Bedieningshendel
EXTRA'S	 • 2 bevestigingshulzen aan hoofdeinde (enkel indien 2-delig ligvlak)	 • Houten ombouw ligvlak

Accessoires

De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders. Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze verpleegbedden, zodat u altijd de zekerheid hebt daadwerkelijk met een kwalitatief hoogstaand product te werken.

001	Bedgalg	 De bedgalg bestaat uit een geplooid dikwandige stalen buis. De bedgalg is voorzien van een handgreep met lint: manueel aanpasbaar of optioneel met automatisch oprolsysteem.	006	Serumhouder	 De serumhouder bestaat uit een vast gedeelte en een verstelbaar gedeelte, voorzien van 4 serumphaken. De serumhouder kan eveneens verkregen worden in een niet-verstelbare versie met 2 serumphaken.
002	Serumhouder voor bedgalg	 De serumhouder voor de bedgalg heeft 4 haken en is eenvoudig op de bedgalg te plaatsen.	007	Opstahulp (*)	 De opstahulp biedt de resident een optimale steun bij het uit- en instappen. De vormgeving maakt een ergonomische uit- en instapbeweging mogelijk.
003	Eettafel voor onrusthekken (*)	 De houten eettafel kan geplaatst worden op alle types onrusthekken en kan eenvoudig worden opgehangen aan het voetpaneel.	008	Urinefleshouder (*)	 De urinefleshouder wordt gemonteerd in de 2 kunststof accessoirehaken die optioneel aanwezig zijn op het bed. Er kan gekozen worden uit 2 modellen.
004	Accessoirebeugel (*)	 De accessoirebeugel kan gebruikt worden wanneer klantspecifieke wensen zich opdringen. De beugel met 4 haken is 310 mm lang en wordt geplaatst in de optionele accessoirehaken.	009	Hoes voor onrusthekken (*)	 De afneembare hoes bestaat uit kunstleder en kan op een zeer eenvoudige manier rond het onrusthekken gemonteerd worden. De hoes biedt voornamelijk bescherming aan onrustige bewoners.
005	Bokaalhouder (*)	 De bokaalhouder is voorzien voor het plaatsen van twee bokaal. De houder wordt geplaatst in de optionele accessoirehaken.	010	Demonteerbare voetensteunverlenging (*)	 Om het ligvlak optimaal te gebruiken bij een bedverlenging, kan er gekozen worden om een los voetverlengstuk van 20 cm aan het voeteneind te plaatsen.

* enkel mogelijk bij Siena Care